

PICOSURE® *pro*
by CYNOSURE®

鉑金原生皮秒

性能与工艺
的完美结合





简介

PicoSure Pro/

去除**所有皮肤类型**中的多余色素

减少皱纹、细纹、痤疮疤痕以及缩小毛孔，**无需恢复期**

改善整体肤色和肤质；为患者带来**更亮、更容光焕发**的肤色

唯一获得 FDA 批准用于治疗黄褐斑色素、太田痣和堀氏母斑的皮秒设备

10 分钟治疗 /

Platinum Focus 透镜发数增加 40%

4 个固定手柄可调节能量（新的 5mm 手柄）

1 个变焦手柄 | 2-6mm


可选 532nm 和 1064nm 波长用于去除纹身功能

新的加速模式 (Boost Mode) 适用于难以去除的纹身

PicoSure Pro 释放您内在的 艺术家/

经过仔细研究和选择，您以患者的最大利益为前提，提供最好的治疗。艺术结合科学，赋予您艺术家的本能，为您的患者皮肤达到期待的效果。

作为市场上最新、顶尖的皮秒激光设备，备有无与伦比的科学研究和工程设计，使您能将皮肤再生艺术提升到新的水平。

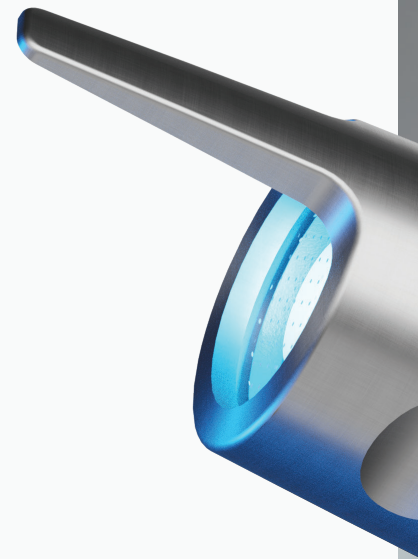



利用 755 nm 能量提供最佳的皮肤再生治疗，无需恢复期。

发数增加 40%，使您能够治疗更多患者

新的可调能量功能提高了定制化水平

在皮秒市场 掀起了一场革命/

率先进入市场

Cynosure 发明了世界上第一台 755nm 皮秒激光器，掀起了美容行业的革命

安全并且经过临床验证

临床证据多于任何其他皮秒设备
超过 83 种同行评审的临床出版物

一流的可靠性和服务

美国制造，使用最高品质的零部件，并以世界一流的工程设计和一流的实践支持为后盾

深受全球信赖的品牌

成功治疗超过一百万次

创新的历史/

Cynosure 以广泛的临床研究和创新为后盾，寻求开发有效并能减轻疼痛、缩短恢复期的皮肤再生治疗方法。

1



Accolade
2008 年

2



Affinity
2009 年

3



Medlite 和 Revlite
2011 年

4



PicoSure
2012 年



5




PicoSure Pro | 2022 年
皮秒技术的最新进展

Platinum *Focus*™ 透镜


治疗细纹、皱纹、痤疮
疤痕和毛孔粗大，无需
恢复期

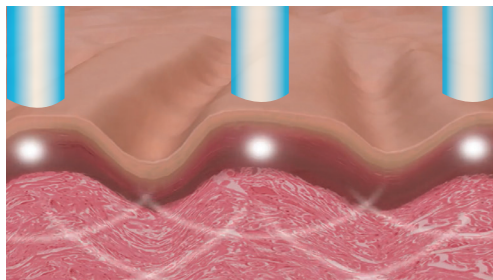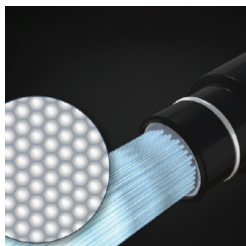


低强度和高强度能量可在表皮层中造成细微损伤，名为“表皮内激光诱导光学击穿”，或称LIOB。随着LIOB的形成，它将产生延伸到真皮层的压力波。

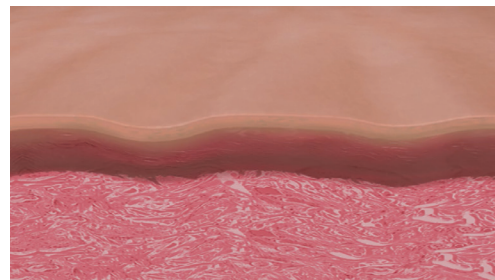

这种压力波将激活身体的自然愈合反应，增加胶原蛋白和弹性蛋白的生成，而又没有其他激光的热副作用或恢复期。

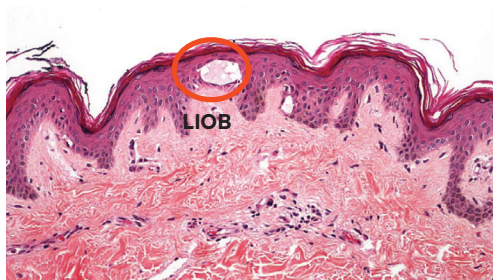


组织学检查显示，在表皮层中形成了LIOB。

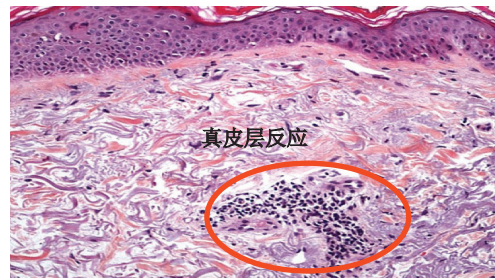


组织学检查显示了真皮层反应，该反应诱发了新的胶原蛋白和弹性蛋白。

平面透镜

治疗所有类型皮肤中的
色素沉着

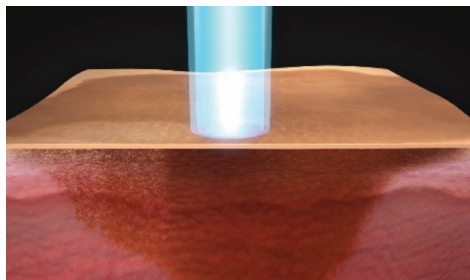

有效地将多余色素粉碎成微小的沙粒状颗粒，
这些颗粒可被身体自然吸收和清除。

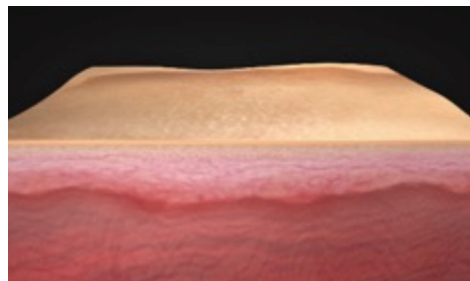

明显清除表皮层和真皮层色素，而不损伤周围
皮肤。






755nm
的强大能量/
安全有效治疗多种皮肤
问题

皮肤再生、无恢复期

755 nm 波长下的黑色素入血吸收率是 1064nm 波长的 3 倍。
这就使其成为理想波长，既适合皮肤再生，又能降低针点出血
的风险，同时还能减少潜在的副作用。

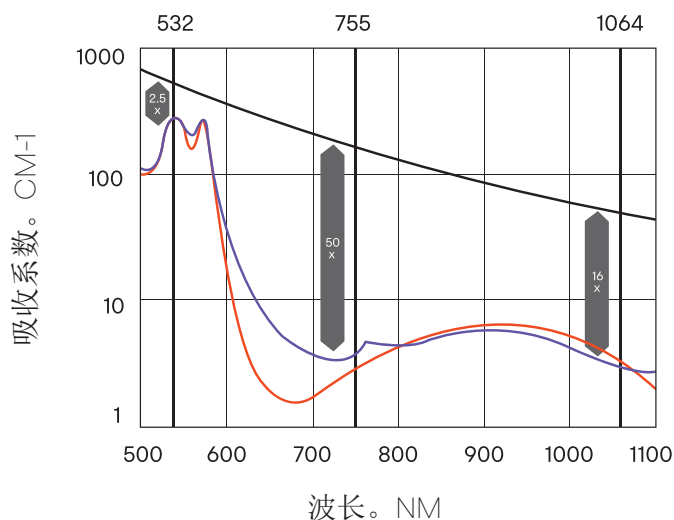

治疗前



刚刚治疗后



3 小时后




24 小时后

这些治疗前后照片中的患者所用设备为 Cynosure PicoSure，而不是本文宣传的 PicoSure Pro 设备。PicoSure Pro 设备与 PicoSure 设备具有相同的参数，因此虽然最终结果因人而异，但预期效果相似。

专家意见/

凭借更高功率、新的适应症范围、更快的治疗速度和更大的灵活性，*PicoSure Pro* 设备将皮秒技术提升到了前所未有的高性能水平。

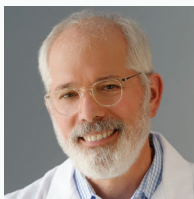

“谈到 *PicoSure Pro*，它的功率给我留下了深刻的印象。更高的功率使我能够使用更大的光斑尺寸，实现更深的渗透。我还喜欢通过不同光斑尺寸调整能量的功能。这一功能让我能定制每次治疗，从而更好地满足患者的具体需求。”

皮肤科医生 Dr. Emil Tanghetti



“我喜欢使用新型 *PicoSure Pro* 治疗肤色较深类型的皮肤以及皮肤变色。调整平面光学透镜和 *Platinum Focus* 透镜能量的功能，确实能让我精细地完成每次治疗。它是我用于治疗色素问题的首选设备。”

皮肤科医生 Dr. Nazanin Saedi



“一位男士首次来我的诊所看诊时，患有面部色素沉着病变，他甚至因此患上了抑郁症。经过一系列 *PicoSure* 治疗后，他的色素沉着被清除，心情也不再抑郁。现在，他对自己的生活保持着真正积极向上的态度，我很高兴其中有我一份功劳。”

皮肤科医生 Dr. Teppei Sakai

PicoSure Pro 不仅仅是一台激光器。 它使您能将患者的生活变得更美好。

100% 患者满意度¹

3 次治疗前后对比

承蒙 Dr. Kentaro Oku 提供



3 次治疗前后对比

承蒙 Dr. Kentaro Oku 提供



3 次治疗前后对比

承蒙 Dr. Emil Tanghetti 提供



这些治疗前后照片中的患者所用设备为 Cynosure PicoSure，而不是本文宣传的 PicoSure Pro 设备。PicoSure Pro 设备与 PicoSure 设备具有相同的参数，因此虽然最终结果因人而异，但预期效果相似。

有关更多信息， 请访问

www.cynosure.com/picosure-pro



¹截至 2021 年 05 月在 RealSelf Worth It 上的评级。

©2023 Cynosure, LLC.保留所有权利。Cynosure, LLC 拥有照片的独家权利。未获 Cynosure 书面许可，禁止使用照片。Cynosure、PicoSure 和 Platinum Focus 透镜是 Cynosure, LLC. 的注册商标和商标。

这些治疗前后照片中的患者所用设备为 Cynosure PicoSure，而不是本文宣传的 PicoSure Pro 设备。PicoSure Pro 设备与 PicoSure 设备具有相同的参数，因此虽然最终结果因人而异，但预期效果相似。

与所有医疗程序类似，并非所有患者均适合接受治疗。应由合格的医师全权负责评估每位受试者是否适合接受治疗，并告知接受治疗者治疗中所涉及的任何风险、术前和术后护理的注意事项，以及任何其他相关信息。疗效因人而异，不保证实际效果。

921-7051-010MAN

规格及配件

标称波长	755 nm
脉冲宽度	500-900 ps
脉冲能量	300 mJ ± 20%
最大能量	6.37 J/cm ²
光斑尺寸	变焦手柄：2.0 mm-6.0 mm 固定手柄：5.0mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm
电源	200-240 V 交流，4.5 kVA，50/60 Hz，单相
电气服务要求	30 A 专用插座
最大放热量	15,500 Btu/h
尺寸 (高 x 宽 x 深)	43 英寸 (109 厘米) x 22 英寸 (56 厘米) x 42 英寸 (107 厘米)
重量	375 磅 (171 千克)

配有平面透镜的 PicoSure Pro 755 已获 FDA 批准，用于治疗 I-VI 类皮肤的色素沉着病变。配有 Platinum Focus 透镜的 PicoSure Pro 755 已获 FDA 批准，用于治疗 I-IV 类皮肤的痤疮疤痕和皱纹。患者治疗结果因人而异。